

REFLEXX S.r.I. NOTA INFORMATIVA rev 03 del 08 settembre 2015

Prodotto: reflexx 92 art. R92/S - art. R92/M - art. R92/L - art. R92/XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico Pag.: 1/3

## GUANTI IN LATTICE NON FELPATI MARCHIO REFLEXX 92

### 1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.R.L. Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel. 0375 833164 Fax. 0375 464504

### 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- □ Guanti in puro lattice, a cinque dita, di colore naturale/ambrato, con bordino antigoccia e zigrinatura antiscivolo in superficie
- □ Guanti clorinati internamente per facilitarne la calzata ed anche esternamente
- ☐ Guanti uniti al paio (mano destra e mano sinistra) in busta chiusa
- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici
- □ Unità di Vendita al paio in busta
- □ Imballaggi esterni contenenti n° 120 buste



Imballo - Pack				
	1	120		
<b>Taglia</b> Size	Articolo Article	<b>Taglia</b> Size	Cartone Carton	
R92 S		s	######################################	
R92 M	8032891631577	М		
R92 L	8032891631584	L	8032891636589	
R92 XL	8032891631591	XL	8032891636596	



	REFLEXX S.r.I.	NOTA INFORMATIVA	rev 03 del 08 settembre 2015		
Ī	Prodotto: reflexx 92 art. R92/ S - art. R92/ M - art. R92/ L - art. R92/ XL				
Γ	Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico Pag.: 2/3				

# 3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

□ Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374

## 4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in mm.)	Taglia		Lunghezza	Larghezza	Peso in g.	Spessore
	descrizione taglia	taglia a norma CE	(min.) in mm. (± 5)	(±3)	Spessore (± 0.4)	
	S	7	300	90	45	
	M	8	300	100	50	0.20
	L	9	300	110	55	0.30
	XL	10	300	115	60	

EN 420	Misure	conforme	
	Indossabilità conforme		
	Destrezza	Massima destrezza Classe 5	

## 5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- 1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
- 2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
- 3. Guanti riutilizzabili DPI: Categoria I di rischio utilizzabile solo per rischi minori (Direttiva 89/686/CEE)



E SEI IN MANI SICURE!

**REFLEXX S.r.I.** 

NOTA INFORMATIVA

rev 03 del 08 settembre 2015

Prodotto: reflexx 92 art. R92/ S - art. R92/ M - art. R92/ L - art. R92/ XL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 3/3

- 4. Il prodotto contiene lattice. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV
- 5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
- 6. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- 7. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
- 8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
- 9. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10° C
- 10. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
- 11. La scadenza è indicata sulla confezione di vendita ed è valida per prodotto debitamente conservato

REFLEXX Srl Via Passeri, 2, 46019 MADANA (MN) P.I. e. F. 92085450209 Tel. 0375 833164 - Fax 0375.464504 e-pail: info@reflexx.com